

EXTRAKTIONSPUFFERRÖHRCHEN



EINWEGTUPFER



TESTKASSETTE



6 SCHRITTE ANLEITUNG ZUM ANTIGEN-SELBSTTEST


POSITIV?

DIE SCHULLEITUNG INFORMIERT 1450 ODER
DIE ÖRTLICHE GESUNDHEITSBEHÖRDE.

NEGATIV?


HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, GESUND BLEIBEN
UND WEITER DIE SCHULE BESUCHEN!

1

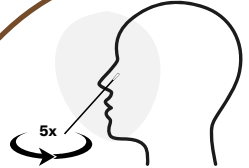

- Tupfer ca. 2,5 Zentimeter in ein Nasenloch einführen
- Das Stäbchen 5 Mal drehen, dabei sanft gegen die Schleimhaut pressen
- Vorgang im anderen Nasenloch wiederholen

2

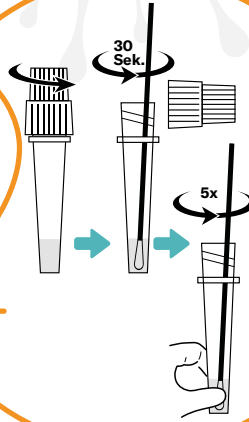


- Röhrchen mit Pufferlösung aufschrauben, ohne es zu drücken
- Das Stäbchen einführen und 30 Sekunden umrühren
- Röhrchen zusammendrücken und währenddessen das Stäbchen mindestens 5 Mal drehen
- Aufpassen, dass Flüssigkeit nicht aus dem Röhrchen spritzt!

3



- Stäbchen entnehmen und dabei Röhrchen zusammendrücken
- Kappe mit Tropferspitze fest aufdrehen
- Röhrchen wirbeln und schütteln

4

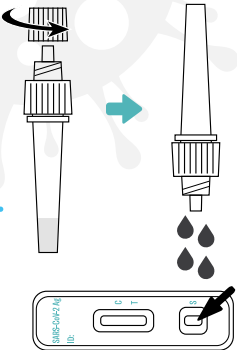

- Testkassette aus der Verpackung nehmen und flach auf den Tisch legen
- Kappe von der Tropferspitze abdrehen
- Röhrchen vorsichtig zusammendrücken und 4 Tropfen auf Testkassette tropfen (Vertiefung S)


5



- 15 Minuten warten
- Das Ergebnis ablesen

6

Ergebnisinterpretation

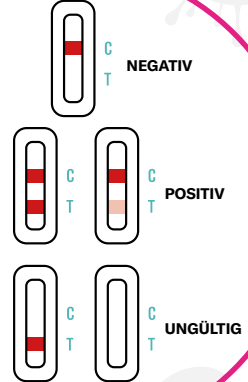

- C T NEGATIV
- C T POSITIV
- C T UNGÜLTIG