




ALLES SPÜLT

ANLEITUNG ZUM PCR-TEST IN DER SCHULE

Alle Informationen zu ALLES SPÜLT gibt's unter: www.bmbwf.gv.at/allesspuelt

WICHTIG

30 MINUTEN VOR DEM TEST NICHT ZÄHNE PUTZEN, KAUGUMMI KAUFEN, TRINKEN, ESSEN ODER RAUCHEN.

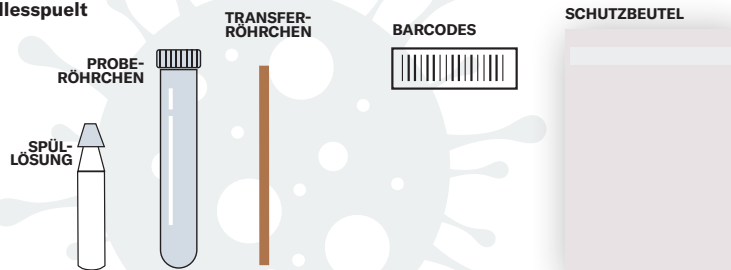

SICHERE SCHULE
www.sichereschule.at

Bundesministerium
Bildung, Wissenschaft
und Forschung

COVID-19 NACHGEWIESEN
DIE SCHULE INFORMIERT DIE SCHÜLERIN/
DEN SCHÜLER, DIE ELTERN/
ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN UND DAS LABOR.

COVID-19 NICHT NACHGEWIESEN
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, GESUND BLEIBEN
UND WEITER DIE SCHULE BESUCHEN!

1

- Löse einen Barcode vom Bogen
- Klebe ihn der Länge nach auf das Röhrchen (NICHT herumwickeln)
- Öffne das Proberöhrchen und lege es vor dir auf den Tisch

2

- Öffne den Behälter mit der Spüllösung
- Leere die Flüssigkeit in den Mund
- Spüle die Flüssigkeit 1 Minute im gesamten Mundraum im Kreis

3

- Spucke die Flüssigkeit über das Transferöhrchen in das Proberöhrchen

4

- Verschiebe das Proberöhrchen mit der Verschlusskappe

5

- Gib die Probe in den Schutzbeutel und verschließe ihn gut

6

- Gib die Probe in den Sack